


WatchPAT™ ONE

POSTUPNI PRIRUČNIK

Pakovanje WatchPAT™ ONE sadrži:

1. Postupni priručnik
2. Uređaj WatchPAT™ ONE - sa sondom za prst (1) i senzorom za prsa (2)*
3. AAA baterija (3)

*Senzor za prsa nije uključen u WatchPAT™ ONE E

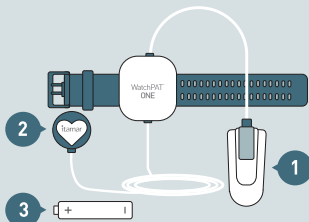

Prije primjene aplikacije WatchPAT ONE, pročitajte sljedeće upute:

Preuzmite aplikaciju WatchPAT ONE na svoj mobilni uređaj (dostupna u Apple App Store ili Google Play Store).

Napomena: Provjerite imate li četveroznamenkasti PIN za aktiviranje uređaja.

- Uklonite usku odjeću, prstenje, satove i drugi nakit.
- Odstranite lak za nokte i umjetne nokte s testnog prsta i provjerite je li nokat kratko odsječen.
- Uređaj treba nositi na nedominantnoj ruci, a senzor za prst može se pričvrstiti na bilo koji prst, osim palca.

Napomena: Za primjenu uređaja može biti potreban nadzor odraslih.

Rukovanje uređajem:

Priprema za početak testa:

- Isključite sve uređaje za odašiljanje u sobi, poput pametnih satova, drugih pametnih telefona i slušalica, jer mogu ometati test.
- Otvorite aplikaciju WatchPAT ONE na svom mobilnom uređaju.
- Slijedite upute u aplikaciji koje će vas voditi kroz korake rukovanja testom.

Napomena: Vaš telefon mora imati pristup internetu dok postavljate uređaj WatchPAT ONE za test.

Na kraju testa:

1. Pritisnite tipku **END RECORDING (Zaustavi snimanje)** u aplikaciji WatchPAT ONE i slijedite upute.
2. Ako je aplikacija zatvorena, otvorite je, provjerite je li Vaš telefon povezan na internet i pričekajte obavijest **"Hvala Vam"** (Thank you).

Napomena: Tek kada u aplikaciji vidite poruku **"Hvala Vam"** (Thank you), test je završen i poslan Vašem liječniku.

Označavanje tehničkih podataka



Za jednokratnu uporabu, nemojte ponovno koristiti



Ograničenje temperature 0 °C – 40 °C



Pogledajte upute za uporabu

1,5V DC

Radni napon baterije

IP22

Stupanj zaštite



Samo primijenjeni dio vrste BF

FCC ID
ZAPUBWPONE

Identifikacijski broj Savezne komisije za komunikacije



Proizvođač medicinskog uređaja

REF

Katabški broj

SN

Serijski broj



Datum proizvodnje



Upotrijebiti do



Proizvod je označen CE logotipom 2797 za BSI

EC REF

Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici



Prema direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), svu otpadnu električnu i elektroničku opremu (EEE) treba sakupljati odvojeno i ne odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Odložite ovaj proizvod i sve njegove dijelove na odgovoran i ekološki prihvatljiv način.



Lomljivo, pažljivo rukovati



Držati na suhom

Step by step video:



Važne napomene:

- Temperatura čuvanja i radna temperatura 0 °C – 40 °C
- Ne pokušavajte spojiti ili odspojiti bilo koji dio jedinice.
- Ne pokušavajte uvesti bilo koji strani predmet u jedinicu.
- Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami riješiti problem.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598
Help Desk: +1-888-748-2627

EC REF

Arazy Group GmbH

The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

itamar
medical
www.itamar-medical.com

REF 0M0193485 - E01