


#### + Βήμα 4 - Ενεργοποίηση της συσκευής

**Σημείωση: Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε.**

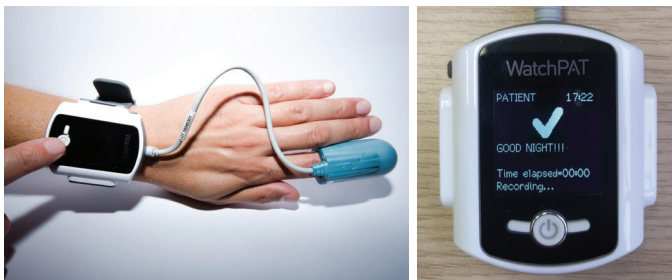

#### + Βήμα 5 - Στη διάρκεια της νύχτας

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το φως της οθόνης θα ανάβει για ένα λεπτό.
- Αν χρειαστεί να σηκωθείτε στη διάρκεια της νύχτας, μην αφαιρέσετε τη συσκευή ή τους αισθητήρες.
- Δεν χρειάζεται να πατήσετε κανένα κουμπί, αν σηκωθείτε στη διάρκεια της νύχτας.
- Αν πρέπει να πάτε στο μπάνιο, φροντίστε ώστε το WatchPAT™ 300 να μην έρθει σε επαφή με νερό.
- Το WatchPAT™ 300 δεν πρέπει να προκαλεί δυσφορία ή πόνο. Αν αισθανθείτε έντονη δυσφορία, αφαιρέστε τη συσκευή και καλέστε το γραφείο βοήθειας.

#### + Βήμα 6 - Επόμενο πρωί

##### Μόλις ξυπνήσετε:

- 6a.** Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Δεν υπάρχει κουμπί απενεργοποίησης.
- 6b.** Αφαιρέστε τον αισθητήρα δαχτύλου και τον αισθητήρα RESBP.
- 6c.** Αφαιρέστε τη συσκευή από τον καρπό σας.
- 6d.** Τοποθετήστε όλα τα τμήματα ξανά στη θήκη μεταφοράς.

##### **!** Σημαντικές σημειώσεις:

- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της μονάδας.
  - Μην προσπαθήσετε να εισαγάγετε κάποιο ξένο αντικείμενο στη μονάδα.
  - Μην προσπαθήσετε να συνδέσετε το WatchPAT™ 300 στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε άλλη συσκευή, σε κάποιο μηχάνημα ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  - Μην επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να επιδιορθώσετε κάποιο πρόβλημα εσείς οι ίδιοι.
  - Ο αισθητήρας δαχτύλου προορίζεται για μία μόνο χρήση. Σε περίπτωση που συνδεθεί ένας ήδη χρησιμοποιημένος αισθητήρας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση ενός ήδη χρησιμοποιημένου αισθητήρα ενέχει τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  - Αν είναι απαραίτητο ή σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησης για να αναφέρετε το περιστατικό και να λάβετε περαιτέρω οδηγίες.
- Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, αναφέρετε το περιστατικό και στην αρμόδια αρχή.

**4a.** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να φωτιστεί η οθόνη. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μήνυμα «Περιμένετε. Εκτελείται δοκιμή...» (Please wait Testing...).

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ!!!» (GOOD NIGHT!!!). ✓

Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αφού παρέλθει ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

**4b.** Σε περίπτωση προβλήματος, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ» (TEST ABORTED). ✗  
Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας, στο τηλέφωνο 1-888-748-2627.

##### **Τώρα μπορείτε να κοιμηθείτε.**

**4c.** Αν το δάχτυλό σας δεν είναι τοποθετημένο μέσα στον αισθητήρα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα υποδεικνύει πώς να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί, εισαγάγετε το δάχτυλο και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε ερωτήσεις;  
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το  
Γραφείο βοήθειας  
1-888-748-2627

ΑΝΑΦΗ ΟΜΣ 193391 Έκδ. 5 02/2023



Αναλυτικές οδηγίες

WatchPAT™ 300  
Μελέτη ύπνου κατ' οίκον



Δείτε το βίντεο οδηγιών στη διεύθυνση:  
[www.watchpat-howtouse.com](http://www.watchpat-howtouse.com)

itamar  
medical

itamar  
medical

| Εύχρηστες λύσεις για την υγεία

[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com) | [infousa@itamar-medical.com](mailto:infousa@itamar-medical.com)

Παγκοσμίως:

**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO 3579  
Caesarea 3088900, Ισραήλ  
Τηλ.: +972 4 617 7000  
Φαξ + 972 4 627 5598

ΗΠΑ:

**Itamar Medical Inc.**  
3290 Cumberland Club Drive, Suite  
100 Atlanta, Georgia 30339, USA  
Τηλ. 1 888 748 2627

**EC REP Arazy Group GmbH**  
The Squire 12, Am Flughafen,  
60549 Frankfurt am Main,  
Γερμανία

Προσοχή: Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.), αυτή η συσκευή πρέπει να πωλείται ή να συνταγογραφείται αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Δικαιώματα δημιουργού © 2023 Itamar Medical Ltd. Τα WatchPAT και PAT είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Itamar Medical Ltd., θυγατρικής της ZOLL Medical Corporation, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

## WatchPAT™ 300 - Αναλυτικός οδηγός

Ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό αφού λάβετε τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή WatchPAT™ 300 από έναν επαγγελματία υγείας.



- A - Κουμπί λειτουργίας
- B - Αισθητήρας ροχαλητού εισπνευστικής προσπάθειας και θέσης σώματος (RESBP)
- Γ - Αισθητήρας δαχτύλου

Πριν φορέσετε το WatchPAT™ 300:

- Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη συσκευή WatchPAT 300 στο μη κυρίαρχο χέρι.
- Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δάχτυλο, εκτός του αντίχειρα. Αν έχετε μεγάλα δάχτυλα, επιλέξτε το μικρό σας δάχτυλο.
- Πριν τη χρήση, αφαιρέστε ρούχα με στενή εφαρμογή, δαχτυλίδια, ρολόγια και άλλα κοσμήματα που ίσως φοράτε.
- Αφαιρέστε το βερνίκι νυχιών ή τεχνητά νύχια από το δάχτυλο που θα χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη και βεβαιωθείτε ότι το νύχι σας είναι κομμένο κοντό.

Σημειώσεις:

- Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή WatchPAT™ 300, δεν μπορείτε πλέον να την απενεργοποιήσετε.
- Επομένως, φορέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή όταν είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε.
- Η εφαρμογή της συσκευής ίσως πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Οι εικόνες στον οδηγό επίδειξης παρουσιάζουν το αριστερό χέρι. Ισχύει ακριβώς η ίδια διαδικασία και για το δεξί χέρι.




Η θήκη μεταφοράς περιέχει τα εξής:

- Αυτόν τον οδηγό αναφοράς
- Συσκευή με αισθητήρα δαχτύλου
- Αισθητήρα ροχαλητού εισπνευστικής προσπάθειας και θέσης σώματος (RESBP)

Τηλεφωνικός αριθμός Γραφείου Βοήθειας 1-888-748-2627



+ Βήμα 1 - Τοποθέτηση αισθητήρα ροχαλητού εισπνευστικής προσπάθειας και θέσης σώματος (RESBP)

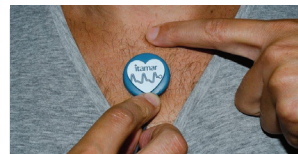

- 1a. Για τους άνδρες: Τριμάρετε τις τρίχες στο στήρνο σας, αν χρειάζεται.
- 1b. Περάστε τον αισθητήρα RESBP μέσα από το μανίκι και στη συνέχεια μέσα από το άνοιγμα της λαιμόκοψης.



- 1d. Τοποθετήστε τον αισθητήρα ψηλά στο κέντρο του στήρνου, ακριβώς κάτω από τον λαιμό. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα στον αισθητήρα RESBP είναι στραμμένη προς τα επάνω.



- 1c. Αφαιρέστε τη λευκή ταινία από το πίσω μέρος του αισθητήρα.



- 1e. Ασφαλίστε τον αισθητήρα RESBP στη θέση του χρησιμοποιώντας επιπλέον ιατρική ταινία.

+ Βήμα 2 - Εφαρμογή της συσκευής WatchPAT™ 300



- 2a. Φορέστε τη συσκευή στο μη κυρίαρχο χέρι σας.
- 2b. Κλείστε το λουράκι (όχι υπερβολικά σφιχτά).

+ Βήμα 3 - Τοποθέτηση αισθητήρα δαχτύλου



- 3a. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δάχτυλο, εκτός του αντίχειρα. Αν έχετε μεγάλα δάχτυλα, επιλέξτε το μικρό σας δάχτυλο.
- 3b. Τοποθετήστε το δάχτυλο στον αισθητήρα μέχρι να ακουμπήσει στο άκρο του. Το αυτοκόλλητο με την ένδειξη TOP πρέπει να βρίσκεται στο επάνω μέρος του δαχτύλου σας (πάνω από το νύχι).



- 3c. Τοποθετήστε το άκρο του αισθητήρα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια (π.χ. σε ένα τραπέζι, στο πόδι σας κ.λπ.).
- 3d. Τραβήξτε την ετικέτα TOP για να την αφαιρέσετε από τον αισθητήρα.