

WatchPAT⁺ ONE

Test monoso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Per istruzioni video dettagliate visitare:

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT⁺ ONE

Test monoso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno



Etichettatura delle specifiche tecniche



Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un professionista sanitario autorizzato o dietro prescrizione medica



Monoso, non riutilizzare



Limite di temperatura: 0 °C - 40 °C



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso



Tensione di esercizio della batteria



Protezione da agenti esterni



Parte applicata di tipo BF



Numero di identificazione della Federal Communications Commission



Produttore del dispositivo medico



Numero di catalogo



Numero di serie



Data di fabbricazione



Data di scadenza



Secondo la Direttiva RAEE 2012/19/UE, tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire questo prodotto e tutte le sue parti in modo responsabile ed ecologico.



Fragile, maneggiare con cautela



Mantenere asciutto



IC: 27705-WATCHPATONE Numero della certificazione ISED Canada



HWID: WatchPAT ONE Identifica le specifiche hardware di una versione del prodotto



Dispositivo medico



Simboli di certificazione giapponesi

REF: 010219A70 - Ed. 3

Per eventuali domande è possibile contattare l'Help Desk di Itamar[®] Medical al numero:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Istruzioni dettagliate

Leggere il codice QR riportato in basso per scaricare l'applicazione WatchPAT⁺ ONE.



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
T. +972-4-6177000, F. +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
Typische Messanordnung 60549
Frankfurt am Main,
Germany



Note importanti:

- Temperature di conservazione e di funzionamento: 0 °C - 40 °C
- Non tentare di collegare o scollegare le parti dell'unità.
- Non tentare di introdurre corpi estranei nell'unità.
- Non provare in alcun caso a risolvere un problema da soli.
- Il dispositivo WatchPAT⁺ ONE non deve causare disagio o dolore. In caso di disagio insopportabile, rimuovere il dispositivo e chiamare l'Help Desk.
- Ispezionare visivamente la batteria prima di inserirla, per verificare che non presenti rigonfiamenti, incrinature, perdite o altri difetti.

Per istruzioni video dettagliate, visitare: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Istruzioni dettagliate

Queste istruzioni dettagliate mostrano come usare correttamente il test per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno WatchPAT® ONE.

Prima di applicare WatchPAT® ONE:

- ✦ Si consiglia di applicare il dispositivo WatchPAT® ONE alla mano non dominante.
- ✦ La sonda può essere indossata su qualsiasi dito ad eccezione del pollice.
- ✦ Prima dell'uso, rimuovere indumenti stretti, anelli, orologi e altri gioielli.
- ✦ Rimuovere l'eventuale smalto o unghia finta dal dito scelto per l'esame e assicurarsi che l'unghia sia tagliata corta.

Nota: utilizzare solo batterie AAA alcaline.
Non inserire la batteria fino al momento di andare a letto.

1. Prima di procedere con lo studio del sonno, assicurarsi di disporre di accesso a Internet, telefono, dispositivo WatchPAT® ONE e numero PIN.



Telefono



WatchPAT® ONE



Accesso a Internet



Numero PIN

2. Scaricare sul proprio smartphone l'applicazione WatchPAT® ONE (disponibile su Apple App Store e Google Play Store).



3. Aprire l'applicazione WatchPAT® ONE e consentire tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione e necessarie per il suo funzionamento.


Estrarre il dispositivo WatchPAT® ONE dalla confezione. È possibile fare clic sul pulsante "Anteprima" nell'applicazione per ricevere un tutorial rapido su come configurare il dispositivo.

ANTEPRIMA

Al termine, premere il pulsante "Pronto".

PRONTO


4. Inserire la batteria nel dispositivo WatchPAT® ONE.

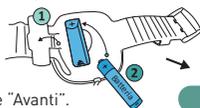

Al termine, premere "Avanti".

AVANTI

5. Rimuovere l'orologio ed eventuali gioielli dalla mano scelta per il test.

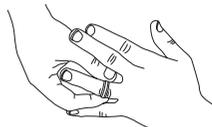

Al termine, premere "Avanti".

AVANTI

6. Inserire il codice PIN di 4 cifre ricevuto dallo studio del proprio medico o dal fornitore e premere "Invio".

INSERIRE IL PIN
Inserire il PIN (numero di identificazione personale) di quattro cifre assegnato all'utente e toccare INVIO.

INVIO

7. Indossare il dispositivo WatchPAT® ONE sulla mano non dominante. Assicurarsi che non sia troppo stretto né troppo largo.



Al termine, premere "Avanti".

AVANTI

8. Far passare il cavo del sensore toracico (sensore per il russamento e la posizione del corpo) attraverso la manica, facendolo uscire dall'apertura del collo. Rimuovere la linguetta dall'adesivo e applicare il sensore subito sotto l'incavo sovrasternale.




Al termine, premere "Avanti".

AVANTI

* Se il dispositivo WatchPAT® ONE non include il sensore toracico, saltare questo passaggio.

9. Inserire la sonda completamente su un dito della mano non dominante. È possibile scegliere qualsiasi dito ad eccezione del pollice. Inserire la sonda in modo che l'adesivo contrassegnato con TOP sia posizionato sopra l'unghia. Tenere la sonda contro una superficie rigida e tirare lentamente la linguetta TOP verso di sé per rimuoverla dalla sonda.

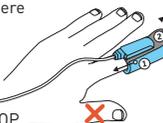

Al termine, premere "Avanti".

AVANTI

10. L'installazione è completata. Ultimi passaggi prima di iniziare lo studio del sonno:

- Assicurarsi che il telefono non si trovi a più di 5 metri/15 piedi dal dispositivo WatchPAT® ONE.
- Spegner tutti gli altri dispositivi di trasmissione nell'ambiente, come altri smartphone, smartwatch e cuffie, poiché potrebbero interferire con il test.
- Collegare il telefono al caricatore; dovrà rimanere collegato per tutta la notte. Se durante la notte si ha bisogno di alzarsi, lasciare il telefono collegato; non è necessario portarlo con sé.

A questo punto fare clic sul pulsante "Avvio" per iniziare lo studio del sonno.

AVVIO

11. Al mattino, appena svegli, premere il pulsante "Fine della registrazione" e attendere qualche minuto che il dispositivo completi la trasmissione dei dati. Una volta completata la trasmissione dei dati, si riceverà un messaggio di ringraziamento.

Dopo aver ricevuto il messaggio, premere "Chiudere l'app".

FINE DELLA REGISTRAZIONE

CHIUDERE L'APP

12. Rimuovere il sensore toracico, la sonda e il dispositivo WatchPAT® ONE.

Al di fuori degli USA: non è necessario conservare il dispositivo o restituirlo. Si può semplicemente smaltirlo.

Per gli USA: se si desidera aderire al Green Program di WatchPAT® ONE, è possibile restituire il dispositivo con l'etichetta di reso prepagato fornita. Al termine del test, riporre il dispositivo nella scatola, apporre l'etichetta sulla scatola come illustrato e spedirlo a noi per un trattamento adeguato a tutela dell'ambiente. Questo servizio non prevede alcun costo. Se si sceglie di non aderire al Green Program di WatchPAT® ONE, non è necessario conservare il dispositivo o restituirlo. Si può semplicemente smaltirlo.