

WatchPAT™ ONE

Οικιακή συσκευή μελέτης υπνικής άπνοιας μίας χρήσης

WatchPAT™ ONE Green Program

Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα WatchPAT™ ONE Green Program*, αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη ύπνου:

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή WatchPAT™ ONE και τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στο κουτί της.
2. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.itamar-medical.com/greenprogram, συμπληρώστε το έντυπο και εκτυπώστε την προπληρωμένη ετικέτα επιστροφής.
3. Προσαρτήστε την ετικέτα στο κουτί και στείλτε μας πίσω τη συσκευή, χωρίς καμία χρέωση.

Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε σε ένα πιο πράσινο μέλλον!

*Το πρόγραμμα Green Program του WatchPAT™ ONE είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

⚠️ Σημαντικές σημειώσεις:

- Το WatchPAT™ ONE ενδείκνυται για ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι πάσχουν από αναπνευστικές διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο.
- Το WatchPAT™ ONE είναι μια συσκευή μίας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων μίας χρήσης μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη επιμόλυνση.
- Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και το γραφείο εξυπηρέτησης της Itamar για να λάβετε περαιτέρω οδηγίες.
- Θερμοκρασίες φύλαξης και λειτουργίας 0°C - 40°C
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της μονάδας.
- Μην προσπαθήσετε να εισαγάγετε κάποιο ξένο αντικείμενο στη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να επιδιορθώσετε τη συσκευή WatchPAT™ ONE εσείς οι ίδιοι.
- Το WatchPAT™ ONE δεν πρέπει να προκαλεί δυσφορία ή πόνο. Αν αισθανθείτε έντονη δυσφορία, αφαιρέστε τη συσκευή WatchPAT™ ONE και καλέστε το γραφείο βοήθειας.
- Ελέγξτε οπτικά τη μπαταρία πριν από την τοποθέτηση, για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι διογκωμένη και δεν έχει ρωγμές ή διαρροή ή άλλο ελάττωμα.
- Πριν από τη χρήση του WatchPAT™ ONE, ο ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί από το ιατρικό προσωπικό.



Για να δείτε το βίντεο με τις αναλυτικές οδηγίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση watchpatone-howtouse.com



Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας της ZOLL Itamar™ στο τηλέφωνο:
1-888-748-2627

ZOLL itamar™

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Ισραήλ
Τηλ.: +972-4-6177000
Φαξ: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Γερμανία



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Οικιακή συσκευή μελέτης υπνικής άπνοιας μίας χρήσης



Αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar™

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή χρήση της οικιακής συσκευής μελέτης υπνικής άπνοιας WatchPAT™ ONE.

Πριν φορέσετε τη συσκευή WatchPAT™ ONE:

- ✦ Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο τηλέφωνό σας, στη συσκευή WatchPAT™ONE και στον κωδικό PIN.
 - ✦ Αφαιρέστε ρούχα με στενή εφαρμογή, κοσμήματα και αξεσουάρ.
 - ✦ Επιλέξτε ένα δάκτυλο του μη κυρίαρχου χεριού σας, εκτός από τον αντίχειρα (αν έχετε μεγάλα δάχτυλα, χρησιμοποιήστε το μικρό σας δάκτυλο).
 - ✦ Κόψτε το νύχι του επιλεγμένου δακτύλου, και αφαιρέστε τυχόν βερνίκι νυχιών ή τεχνητό νύχι.
- Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλική μπαταρία AAA. Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή μόνο όταν είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε.


1. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής WatchPAT™ONE στο κινητό σας τηλέφωνο (διαθέσιμη στα App Store και Google Play Store).

2. Ανοίξτε την εφαρμογή WatchPAT™ONE και επιτρέψτε όλες τις άδειες που ζητούνται. Αυτοί οι όροι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της εφαρμογής. Αφαιρέστε το WatchPAT™ONE από τη συσκευασία. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο του σύντομου οδηγού για μια παρουσίαση της εφαρμογής με οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής WatchPAT™ONE. Πατήστε το κουμπί «Έναρξη ρύθμισης» όταν είστε έτοιμοι.

Έναρξη ρύθμισης

3. Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή WatchPAT™ONE.

Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε >.

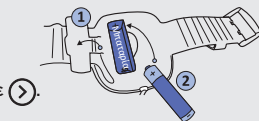

4. Προετοιμασία:

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα στη διάρκεια της νύχτας και δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.
- Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε στο δωμάτιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν απέχει πάνω από 5 μέτρα από τη συσκευή WatchPAT™ONE.
- Απαιτείται η καταγραφή δεδομένων για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών.

5. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό του κωδικού PIN που λάβατε από το γραφείο του ιατρού σας ή του παρόχου υγείας και πατήστε >.



6. Τοποθετήστε τη συσκευή WatchPAT™ONE στον καρπό του μη κυρίαρχου χεριού σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εφαρμόζει πολύ σφικτά ή πολύ χαλαρά. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε >.



7. Εάν η συσκευή σας WatchPAT™ONE περιλαμβάνει αισθητήρα θώρακος:

- Ψυρίστε τις τρίχες στο στήρνο σας, αν χρειάζεται, για να διασφαλίσετε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται σε απευθείας επαφή με την επιδερμίδα σας.
- Περάστε τον αισθητήρα θώρακος μέσα από το μανίκι σας και στη συνέχεια μέσα από το άνοιγμα της λαϊμόκοψης.
- Αφαιρέστε τη λευκή ταινία από το πίσω μέρος του αισθητήρα.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα ψηλά στο κέντρο του θώρακα, ακριβώς κάτω από τη στερνοκλειδική άρθρωση.
- Σας συνιστούμε να ασφαλίσετε τον αισθητήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας ιατρική ταινία. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε >.



8. Τοποθετήστε το δάκτυλο που θα χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη εντελώς μέσα στον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκόλλητο με την ένδειξη TOP είναι ορατό, όταν κοιτάτε το πάνω μέρος του χεριού σας. Πιέστε το άκρο του αισθητήρα σε μια σκληρή επιφάνεια (όπως ένα τραπέζι) και αφαιρέστε αργά την ετικέτα με την ένδειξη «TOP» από τον αισθητήρα.



9. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης εγγραφής για να ξεκινήσει η μελέτη ύπνου σας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή.

Έναρξη εγγραφής

10. Το πρωί, πιέστε το κουμπί «Διακοπή εγγραφής» και περιμένετε η συσκευή WatchPAT™ONE να ολοκληρώσει τη μετάδοση των δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση των δεδομένων θα λάβετε ένα μήνυμα συγχαρητηρίων.

Διακοπή εγγραφής

Κλείσιμο εφαρμογής

Μόλις λάβετε το μήνυμα, πατήστε «Κλείσιμο εφαρμογής».

11. Αφαιρέστε τον αισθητήρα θώρακος, τον αισθητήρα δακτύλου και τη συσκευή WatchPAT™ONE. Απορρίψτε τη συσκευή WatchPAT™ONE σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.